

일회용	의료기기
재사용금지	멸균제품
STERILE R	

친수성 폼 드레싱

# 메디폼®

## [형상 및 구조]

본 제품은 창상의 오염을 방지하고 보호하는 목적으로 사용되는 창상피복재로서, 반투과성 폴리우레탄 필름과 폴리우레탄 폼으로 구성됩니다.

## [사용목적]

창상의 오염방지 및 보호


- 창상이란 찰과상, 화상, 타박상(멍), 수술창, 욕창 등의 외과적 상처를 말합니다.

## [사용 및 조작 방법]

### 가. 사용전의 준비사항

- 1) 본 제품은 전문의료인에 의해 사용되어야 하며 의료용 및 사용목적 이외의 사용을 금합니다.
- 2) 본 제품은 멸균되어 있으므로 환부 접촉면의 오염에 주의하며 개봉 후 바로 사용합니다.
- 3) 멸균팩이 개봉 또는 파손되어 있는 것은 사용하지 않습니다.

### 나. 사용방법

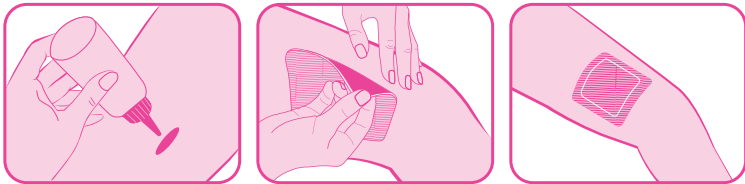

- 1) 상처부위를 소독액 또는 생리 식염수로 깨끗이 씻습니다. 단, 감염된 상처에 소독액을 사용하는 경우 소독액이 남지 않도록 멸균된 생리식염수로 씻습니다.
- 2) 상처부위의 크기보다 2.5cm 큰 폼 사이즈의 제품을 선택한 후 멸균팩에서 꺼냅니다.
- 3) 안쪽의 보호필름을 벗긴 후, 보호필름이 붙어있던 면으로 상처부위에 붙입니다.
- 4) 본 폼의 주위를 붕대, Surgical Tape, 반창고 등으로 고정합니다.
- 5) 상처의 삼출액이 많고 삼출액의 누출이 예상되는 경우에는 자주 교환해 주고, 삼출액의 누출이 없으며 감염의 징후가 없는 경우에는 3~4일간 사용 후에 교환합니다.

### 다. 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 본 제품은 일회용으로 재사용을 금합니다.
- 2) 고온, 다습한 곳을 피하고 실온 보관합니다.
- 3) 직사광선이 쬐이지 않는 곳에 보관합니다.

# Medifoam®

Hydrophilic Foam Dressing

## 라. 사용할 때 주의사항

### 1) 금기사항

본 제품의 사용 중 발진, 발열, 알레르기 반응이나 감염 증상이 있을 경우에는 사용을 금하고, 의사의 지시에 따라 적절한 치료를 받도록 합니다.

### 2) 경고 또는 주의사항

- ① 본 제품의 배면층에서 삼출액의 흡수상태를 관찰할 수 있으므로 가장자리로부터 약 90%까지 삼출액이 흡수 또는 확장된 때에 드레싱을 교환합니다.
- ② 출혈이 심한 상태에서는 지혈처치 후 사용합니다.
- ③ 감염된 창상(발적, 종창, 동통, 열감, 강한 악취 및 농의 배출 등의 증상이 있는 창상)에는 이물이나 농, 괴사조직과 같은 세균증식의 원인을 제거한 후 사용합니다.
- ④ 본 제품은 Disposable(1회용) 제품이므로 재사용을 금하고, 사용한 제품은 다른 병원 폐기물과 함께 폐기 처분해 주십시오.

[품목명] 국소폼제창상피복재

[모델명] 별도표기

[저장방법] 실온보관

[사용기한] 별도표기

[포장단위] 별도표기

### 제조사

Genewel (주)제네웰 파성지사  
 경기도 화성시 향남읍 솔태상두길 281-2  
 www.genewel.com

### 판매자

한국먼디파마(유)  
 서울특별시 중구 한강대로 416  
 서울스퀘어 3층  
 제품문의처 080-800-5689

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약, 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국 및 판매업자를 통하여 교환하여 드립니다.

®: 메디폼 and MEDIFOAM are Registered Trademarks.

첨부문서 작성년월 : 2018년 05월

KR-MED-2060-V1-1118 Rev.04